

 RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN	PROSEDUR RE USE N-95, METODE PEMANASAN KERING		
	No Dokumen : 445/AK-SPO-PPI/70/14	No Revisi :	Halaman : 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 April 2020	Ditetapkan Direktur  <u>dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M.Kes</u> NIP. 19660103 199602 1 002
Pengertian	Tata cara melakukan re use respirator N-95 darurat covid-19 dengan metode pemanasan kering.	
Tujuan	Penggunaan kembali masker N 95 setelah digunakan untuk memeriksa pasien yang menimbulkan aerosol.	
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur Nomor 445/146 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknik Alat Pelindung Diri (APD)	
Prosedur	1. Pastikan kebersihan respirator(tidak terkontaminasi darah, cairan hidung atau cairan tubuh lain dari pasien). 2. Pastikan respirator dalam kondisi baik.	

 RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN	PROSEDUR RE USE N-95, METODE PEMANASAN KERING		
	No Dokumen : 445/AK-SPO-PPI/70/14	No Revisi :	Halaman : 2 / 3

	3. Berikan nama,dan beri tanggal penggunaan pada bagian samping respirator . 4. Masukkan respirator N 95 pada toples berlobang, lalu tempel stiker (nama dan berapa kali sudah di re use). 5. Lakukan pemrosesan ulang dengan panas kering 70⁰ selama 30 menit. 6. Lakukan Penyimpanan respirator N 95 pakai ulang pada tempat yang bersih, kering, dengan suhu dan kelembaban yang terkontrol. 7. Wadah tempat penyimpanan dilakukan disinfektan dengan alcohol (disinfektan tingkat rendah) minimal sehari sekali. 8. Cuci tangan sebelum dan sesudah memproses respirator N 95. 9. Respirator N 95 dipakai ulang oleh petugas yang sama.		
Unit Terkait	1. Bangsal Utari (ODP) 2. ICU 3. IGD 4. IBS 5. Komite PPI		
Catatan Revisi	No	Isi Perubahan	Tanggal Revisi

 RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN	PROSEDUR RE USE N-95, METODE PEMANASAN KERING		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/70/14	No Revisi :	Halaman : 3 / 3

--	--	--	--